


RFQ

RFQ- Klammerentferner 12 cm

10-88503-12

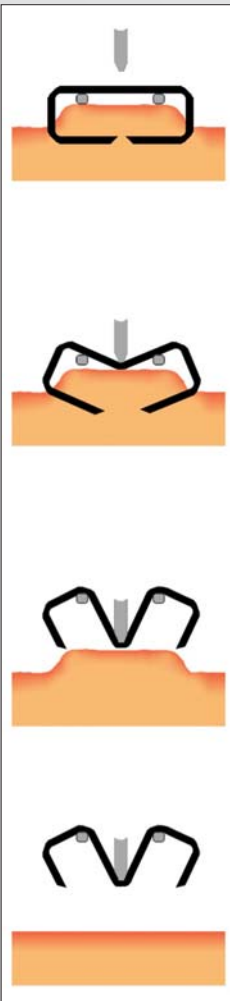

Schieben Sie vorsichtig den unteren Führungsarm des Klammerentferners unter die Klammer.

Schliessen Sie das Instrument, dass die Klammer sich verformt.

Der Klammerentferner muss komplett geschlossen sein, dass die Klammer komplett geöffnet ist.

Jetzt kann die Klammer problemlos entfernt werden.



RFQ-Medizintechnik GmbH & Co. KG
Bruderhofstrasse 10-12
D-78532 Tuttlingen
Telefon +49(0)7461/96170
Telefax +49(0)7461/961720
E-Mail: info@rfq.de
Internet: <http://www.rfq.de>