

## Gebrauchsanweisung für 64-20850-23 RP-Kolben aus Kunststoff mit O-Ringen für Pistolensystem (RPS)

### Montage des Reinigungspistolensystems nach der Sterilisation



Überprüfen Sie bitte vor der Montage, ob alle abgebildeten Dichtungsringe vorhanden und intakt sind!  
Alle Teile **durch Rechtsdrehung handfest** verschrauben.

Bei Verwendung der Reinigungspistole mit Druckluft und Wasser:

1. Den vorderen Kolbenbereich und den kleinen Kolben O-Ring zur Montage mit einölen! reinem Silikonöl (Dabei sollte der Ölfilm möglichst dünn aufgetragen werden (Minimalschmierung!).  
Trockenes Einschleiben zerstört die Kolbendichtung!  
Anschließend den Kolben in den Pistolenkörper schieben, die Kolbenfeder über den Kolben schieben, und die Verschlusskappe auf den Pistolenkörper schrauben.
2. Die Düsenkappe vorne auf den Pistolenkörper schrauben und die gewünschte Düse in die Düsenkappe schrauben.
3. Den Pistolengriff bis zum Anschlag in den Pistolenkörper schrauben.
4. Den Stecknippel des Handgriffes 7,2 mit reinem Silikonöl einölen, falls dieser sich schwer in die Edelstahlkupplung DN einschieben oder entfernen lässt.
5. Den Abzughebel in den Pistolenkörper stecken und mittels Abzughebel-Verschluss-Stift fixieren und durch Abklappen arretieren.

**Hinweis:** Das mitgelieferte Silikonöl ist nicht steril.

**Achtung:** Öle, die Weißöl bzw. Paraffinöl enthalten, zerstören die Dichtungsringe.

**Hinweis:** Lässt sich der RP-Kolben trotz Einölen schwer aus dem Pistolenkörper entfernen bzw. einschieben, muss der RP-Kolben O-Ring klein REF 64-20850-24 erneuert werden.